


2016

Omunis

*We make it **accessible***

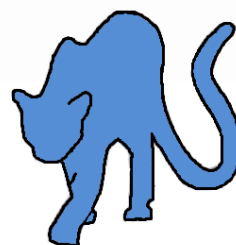

PUMA HDV Kit
PCR. Universal. Molecular. Access.



Cap Alpha – 9 Avenue de l'Europe – 34830 Clapiers, France
Tel : +33 (0)4.34.35.91.18 – www.omunis.com – Email : contact@omunis.com

Validations techniques

Comparaison à la technique de référence*

* PCR « maison », nous contacter pour plus d'informations

	OMUNIS	Technique de référence
Répétabilité	0.41 – 1.28%	Non réalisé
Reproductibilité	3.38 – 4.77%	Non réalisé
LOD	100 copies /ml	100 copies /ml
Linéarité	$R^2 = 0.9837$ (6log)	Non réalisé
Temps requis	2 hours	2 days
Efficacité	>90%	>75%

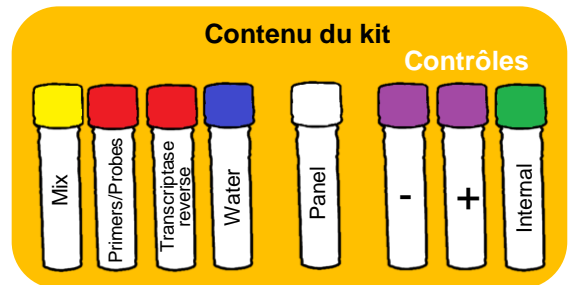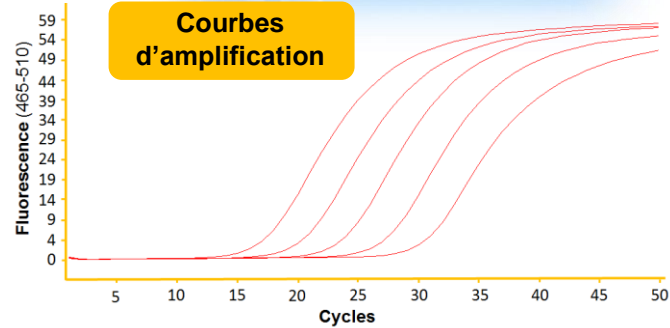


Validations cliniques


Comparaison à la technique de référence*

* PCR « maison », nous contacter pour plus d'informations

Corrélation de charge virale Omunis vs Technique de référence

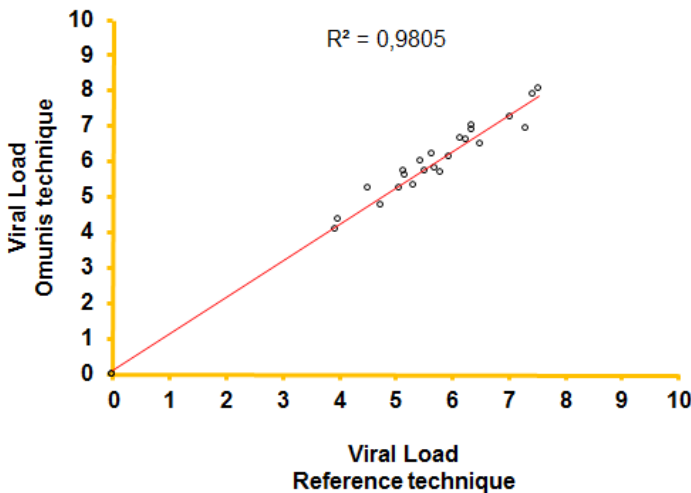

Bland & Altman Omunis vs Technique de référence

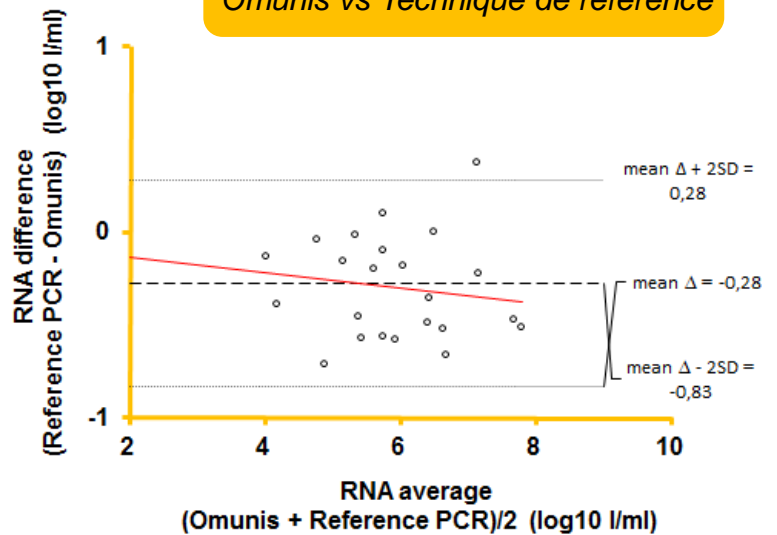

Spécificité: 100%
Sur 25 échantillons cliniques

Sensibilité: 100%
Sur 25 échantillons cliniques

100% de détection
des 9 génotypes